

# HANDLEIDING D-TREX-2G



## 1 Belangrijk!

### 1.1 Veiligheidsinstructies

- Lees voor gebruik de handleiding.
- Test het toestel altijd voor gebruik volgens de handleiding.
- Dit product is mogelijk niet voor iedereen geschikt.
- Test het toestel regelmatig en vervang het indien nodig.
- Controleer altijd de functie van het product nadat u aanpassingen hebt gedaan.
- Onze apparaten zijn NIET bedoeld als een life support-apparaat, d.w.z. een apparaat waarvan een storing kan leiden tot schade aan een leven.

### 1.2 Gebruik

- Gebruik alleen originele onderdelen.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- Houd gescheiden van stof, vocht of vuil.
- Laat het apparaat niet vallen, klop, draai het niet en schud het niet.
- Verwarm het apparaat niet en gebruik het niet in de buurt van vuur.
- Neem contact op met een NEAT-dealer voor reparaties.

### 1.3 Reinigen

- Reinig het apparaat met een zachte doek, licht bevochtigd met een mild sopje.
- Reinig het apparaat niet met agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of andere bijtende stoffen.

### 1.4 Recycling

- Voer het op de juiste manier af. Het versleten product moet worden afgevoerd naar een recyclefaciliteit voor correcte verwijdering of worden teruggestuurd naar NEAT.

## 2 Product overzicht

D-TREX-2G is een draagbare alarmontvanger voor eenvoudige en duidelijke alarmontvangst en bevestiging.

### 2.1 D-TREX-2G kit inhoud



### 2.2 D-TREX2G Kit onderdelen

No	Part
1	D-TREX2G toestel
2	AC adaptor
3	USB kabel A - MiniUSB
4	Mini USB oplaad adaptor

### 2.3 Accessoires




CHARGE



Tasje

## 3 Bediening

### 3.1 Het toetsenbord

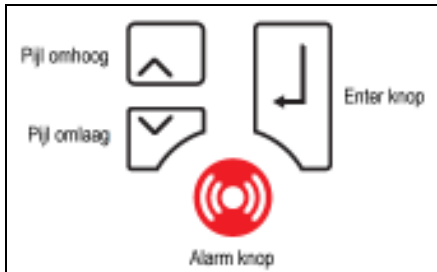

### 3.2 In- en uitschakelen

Druk op pijltje omhoog (^) en houd dit 3 seconden vast. De D-TREX geeft nu een pieptoontje.

Kies, indien nodig, een "User ID"

Kies, indien nodig, een "Group-ID"

Om uit te schakelen weer op pijltje omhoog (^) drukken en dit 3 seconden vasthouden.

### 3.3 Oproep beantwoorden

Als er een oproep binnenkomt dan volgen (piep)toontjes en/of trillingen.

Accepteer de oproep door op de "Enter" knop te drukken.

Indien de oproep (nog) niet geaccepteerd kan worden, druk op pijltje omlaag, om de oproeptoon te stoppen.

De oproep blijft staan totdat ze beantwoord is of totdat de ingestelde tijd voorbij is.

### 3.4 Vraag om assistentie.

Druk op de rode knop en houd deze 3 seconden vast en er gaat een verzoek om assistentie naar de andere D-TREXen. Hierbij wordt eventueel ook de locatie van de laatste oproep vermeld.

### 3.5 Volume instellen

In sommige gevallen kan het nodig zijn dat het toestel minder of geen geluid maakt. Ga hiervoor met het pijltje omlaag naar "Preferences" en druk op "Enter". Kies dan "Sound level" en kies daarna "Low" of "No sound". Ga hierna stapsgewijs terug naar het openingsscherm. Een alarmoproep is nu alleen maar merkbaar door trillingen.

Hoewel de accu voldoende capaciteit heeft voor langdurig gebruik is het toch beter om de D-TREX-2G in/aan een lader te plaatsen als de D-TREX niet in gebruik is.

#### 4 Technische gegevens

Accu stand-by tijd	Ongeveer 8 dagen
Afmetingen	48 x 100 x 21 mm
Gewicht	Ongeveer 60 g, inclusief accu
Temperatuur bereik	+5 ~ +55° C
Accu type	Li-Po, 600 mAh
Frequentie	869,2 MHz (sociaal alarm)
	869,4 MHz