

TREX 2G

Draagbare zend/ontvanger
Gebruikershandleiding

Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder verplichting om enige persoon of organisatie in kennis te stellen van dergelijke wijzigingen of verbeteringen.

NEAT Electronics AB is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens, inkomen of welke indirecte schade dan ook.

Bezoek onze web site voor meer informatie, details en beschrijvingen:

www.neatelectronics.se

NEAT Electronics verklaart dat dit mobiele apparaat, type NE10 09239-01, in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen:

Richtlijnen:

1999/5/CE (RTTE)
2004/108/EG (EMC)
2006/95/EG (LVD)

Normen:

EMC:
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008)
EN 301 is 489-3 V1.4.1 (2002)
Radio:
EN 300 220-2 V2.3.1 categorie III
Low Voltage:
EN 60950-1:2006 A11:2010




Martin Hagbyhn
Managing director

Inhoud

<i>In de verpakking</i>	3
<i>Toetsenbord</i>	4
<i>Netvoeding</i>	4
Laadapparaat	4
<i>TREX 2G eerste set-up</i>	5
Inschakelen	5
Uitschakelen	5
Algemene functies	5
Statusbar	6
Datum en tijd instellen	6
<i>Zenders</i>	7
Een zender toevoegen	7
Een zender verwijderen	9
Posities	10
Een alarm ontvangen	10
Meer alarmmeldingen	12
<i>Assistentie alarm</i>	13
<i>Diverse instellingen</i>	13
Geavanceerde instellingen	14
<i>TREX 2G Techn. handboek</i>	14
<i>TREX 2G Programmer</i>	14
<i>Probleemoplossing</i>	15
<i>Opmerkingen mbt veiligheid</i>	15
<i>Zorg en onderhoud</i>	15

In de verpakking

- 1 x TREX-2G toestel
- 1 x AC adapter, 230 V

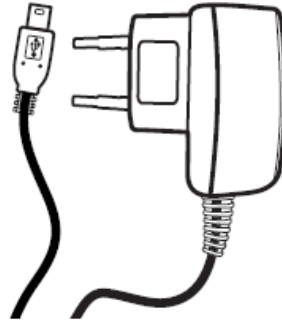

- 1 x Mini USB adapter



- Deze handleiding

Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met de leverancier.

Het toetsenbord



Netvoeding



Voordat het apparaat voor het eerst gebruikt wordt moet de accu volledig opgeladen worden.

Laadapparaat

De AC adapter kan met de meegeleverde mini-USB adapter of met het laadstation (optioneel) gebruikt worden.

Mini USB adapter (meegeleverd)

Verbind de AC adapter met de TREX 2G via de mini USB adapter. Klik de mini USB adapter op de onderkant van de TREX 2G, vanaf het toetsenbord naar beneden, totdat het aan de achterkant op z'n plaats klikt.



Laadstation (optioneel)

Als het laadstation gebruikt wordt, plaats dan eerst de onderkant op de contact pennetjes en druk dan de bovenkant er in.



Configuratie is niet mogelijk met het laadstation, gebruik hiervoor de mini USB adapter

Als de TREX 2G ingeschakeld wordt terwijl deze met de AC adapter verbonden is dan verschijnt het "opladen" scherm.



TREX 2G eerste set-up

Inschakelen

Druk op de pijl omhoog knop en houd deze 3 seconden vast, het hoofdscherm staat nu in het display.



Uitschakelen

Druk op de pijl omhoog knop en houd deze 3 seconden vast (verwijder de USB kabel voor het uitschakelen).

Algemene functies

- Beweeg op en neer in de menu's d.m.v. de pijl op en pijl neer knoppen.
- De actuele waarde is blauw gemerkt.
- Bevestig/ voer in/ selecteer een waarde/ instelling d.m.v. de Enter knop.
- Ga naar het hoofdscherm door "annuleren" in het hoofdmenu te selecteren.
- "Terug" selecteren in een menu gaat terug naar het vorige menu.
- "Terug" selecteren en Enter ingedrukt houden keert terug naar het hoofdscherm.
- Pop-up schermen sluiten automatisch na 5 seconden.

Statusbar



De zes iconen in de statusbar hebben van links naar rechts de volgende betekenis:

- Geluid aan
- Trillen ingeschakeld
- Nieuw alarm
- RFID ingeschakeld
- USB aangesloten
- Accu laden/ accu status

Menu's kiezen

Kies een menu door op de pijl omlaag knop te drukken



Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in via
Hoofdmenu > Voorkeuren > Datum
en tijd.



Selecteer de uren en minuten met
Enter knop, verander de instelling
met pijl omhoog en pijl omlaag
knoppen, bevestig met Enter knop.
Voor de datum geldt hetzelfde.



Herhaal dit voor de datum:



Na bevestiging wordt de ingestelde datum / tijd weergegeven.



Zenders

Een zender toevoegen

Stel, u wilt een ATOM toevoegen die gebruikt wordt in kamer 1.



Ga in het hoofdmenu naar "Programmeren" en selecteer "Voeg zender toe".

Een pop-up venster verschijnt en vraagt om de zender te activeren.



Activeer de zender. Zodra de TRES een zender ontvangt, verschijnt het "Zender toevoegen" scherm in het display.



Selecteer identificatie

Selecteer "Kamer" van de drop-down lijst en bevestig.



Beweeg naar beneden naar het 4 cijferige getal en voeg "1" in, in de meest rechtse positie.



Selecteer nummer

Selecteer "losse zender" uit de onderdelen drop-down lijst.





Bevestig de selectie door op de Enter knop te drukken. Selecteer “opslaan” om de gegevens te bewaren of “terug” om ze te wissen.

De TRES bevestigt dat de gegevens zijn opgeslagen.



Een zender verwijderen



Ga naar hoofdmenu > Programmeren > Verwijder zender.



Selecteer een zender en druk op “Enter”.



Druk op “Enter” om te bevestigen of op “Pijl omlaag” om op te heffen.



De zender is nu verwijderd.



Posities

Kijk voor meer informatie over posities toevoegen/ verwijderen in de D-POS / D-ATOM technische handleiding.

Alarm ontvangen

Activeer de zender. De TRES-2G piept en een pop-up scherm geeft de alarm melding weer.



Het envelopje in de statusbar geeft aan dat dit een nieuw alarm is en de aanduiding 1(1) geeft aan dat dit de 1^e van 1 alarm meldingen is.

De afgebeelde gegevens zijn:

- De zender (Kamer) gevolgd door zijn nummer(1).
- Wat voor apparaat dit is (Losse zender).
- De reden voor alarm (Alarm).



Druk op “Enter” om het alarm te bevestigen en het pop-up scherm te sluiten.

Selecteer: Hoofdmenu > Alarmlijst, selecteer dan de gewenste alarmmelding en druk op “Enter” om het alarm nogmaals te zien. Het laatste alarm staat boven aan de lijst.



Het alarm wordt weergegeven zonder het envelopje in de statusbar en de aanduiding onderin het beeld 0(0) geeft aan dat er geen nieuwe alarmmeldingen zijn.



Druk op “pijl omhoog / omlaag” of “Enter” om terug te gaan naar de Alarm lijst.

Let op! Het is niet mogelijk om alarmmeldingen uit de alarm lijst te verwijderen!

Meer alarmmeldingen

Het scherm geeft bij meer dan één gelijktijdige alarmmelding aan, hoeveel nieuwe alarmmeldingen ontvangen zijn.



Zolang de alarm meldingen niet bevestigd zijn blijft de TRES-2G aandacht vragen met geluid en trillingen. Om dit te stoppen moet op het “pijl omlaag” knopje gedrukt worden. Het pop-up scherm blijft wel staan.

Druk op “Enter” om de eerste nieuwe alarm melding te zien. Dit wordt aangegeven met 1(3) (eerste van drie nieuwe meldingen) onder in het scherm.



Druk nogmaals op “Enter” om het eerste/ oudste nieuwe alarm te bevestigen. Het volgende alarm komt nu direct in het scherm, aangegeven met 1(2).



Blijf op “Enter” drukken om de opeenvolgende alarm oproepen te bevestigen.

Door alarm lijst bladeren

Als echter de gebruiker het eerste/oudste alarm niet wil bevestigen, gebruik dan de pijltjes knoppen om door de alarm lijst te bladeren en gebruik "Enter" om een alarm melding te bevestigen.

Alle andere meldingen blijven als onbevestigd staan totdat de gebruiker of iemand anders het alarm bevestigt.

Assistentie alarm

Druk de rode alarmknop drie seconden lang in om een alarm naar alle andere TRES-2G toestellen te sturen. Als de melding is verstuurd dan verschijnt het volgende pop-up scherm:



Diverse instellingen

Geluid

Stel het geluid in via Hoofdmenu > Voorkeuren > Volume.

Trilling

Schakel trillingen in of uit via Hoofdmenu > Voorkeuren > Vibratie.

Achtergrond verlichting

Zet de achtergrond verlichting aan of uit en stel de tijdsduur in via Hoofdmenu > Voorkeuren > Verlichting.

Technische info

Dit geeft de technische informatie over de TRES-2G weer: Hoofdmenu > programmeren > Technische info.

Geavanceerde instellingen

Deze instellingen worden verder uitgelegd in het technische handboek.

Ontvangst modus

Beslist of de TRES-2G meldingen ontvangt van:

- Aangemelde zenders (standaard)
- Alle zenders

Configuratie

Selecteert of de TRES-2G alleen is in het systeem.

- Eén TRES
- Meer TRESen

Frequentie

Selecteert op welke frequentie de TRES werkt.

Alarm weergave

Stelt in, hoe de meldingen weergegeven worden:

- Normaal
- Log modus (gesorteerd per zender)

TRES-2G Technisch handboek

Het TRES-2G technisch handboek beschrijft de functies van de TRES-2G met meer details en geeft aan, hoe het programma “TRES-2G Programmeer software” gebruikt kan worden.

TRES-2G programmeer software

De TRES-2G software is een krachtig gereedschap om de TRES-2G in te stellen en aan te passen. Alle instellingen en waardes kunnen hiermee geprogrammeerd worden. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie.

Probleemoplossing

1) De TREX-2G start niet op

- Is de accu al opgeladen?
- Is de TREX-2G via USB verbonden met een computer? Verbreek dan deze verbinding en probeer opnieuw.

2) De TREX-2G reageert niet op alarmmeldingen van zenders.

- Is de zender goed aangemeld op de TREX-2G? Zie hiervoor "Een zender toevoegen".

Opmerkingen mbt veiligheid

- Probeer niet om het toestel of de lader open te maken. Neem voor reparaties contact op met uw NEAT dealer.
- De accu heeft een beperkte levensduur. Het vervangen van de accu mag alleen door getraind personeel verricht worden.
- Gebruik de originele lader: NE31 05001-06.

Zorg en onderhoud

- Stel niet bloot aan direct zonlicht
- Houd weg van stof, vocht en vuil.
- Laat het toestel niet vallen, sla, wring of schud het toestel niet.
- Verwarm het toestel niet en gebruik het niet nabij open vuur.
- Maak het toestel schoon met een vochtige doek met een zachte zeepoplossing. Gebruik geen agressieve oplosmiddelen.

Technische gegevens

Accu stand-by tijd	Ongeveer 8 dagen
Afmetingen	48 x 100 x 21 mm
Gewicht	Ongeveer 60 g, inclusief accu
Temperatuur bereik	+5 ~ +55° C
Accu type	Li-Po, 600 mAh
Frequentie	868,7 MHz
	869,2 MHz (sociaal alarm)
	869,4 MHz